


※髪の毛のカットを美容師様にお願いする場合、こちらをお渡しください。

美容師の方へ

ご協力いただきありがとうございます。

毛髪ミネラル検査用 髪の毛の切り方

※パーマやカラーなどの施術前にカットしてください。

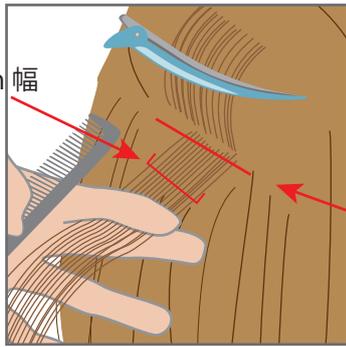

2～3cm幅

※髪の毛の根元から3cmの長さの髪が必要です。

① 後頭部の髪の毛の内側をダッカードでブロッキングした後、2～3cm幅で、できるだけ薄く髪を取ります。

② できるだけ根元ギリギリのラインをカットしてください。(カットした後、髪は離さないまま)

③ 検体袋の枠(3cm)に合わせてカットします。


④ 根元から3cmを検体袋に入れ、毛先側は捨ててください。

※髪の毛の長さが3cm未満の場合は、そのまま検体袋に入れてください。



⑤ ①～④を2～3回繰り返し、検体袋の枠が埋まるくらいの量を集めてください。

※約100本程度、爪楊枝3本分くらいの量です。

※小分けにするのは、切った箇所が目立たないようにするためです。

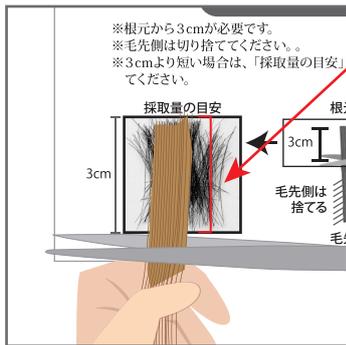

検体袋

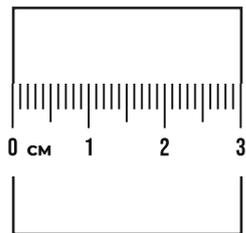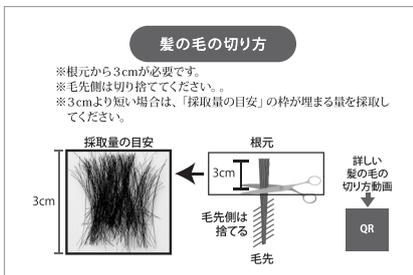

3cm (実寸)

※髪の毛の利用目的

毛髪中に含まれるミネラルや有害金属を測定する『毛髪ミネラル検査』の検体として利用します。ご協力いただき、ありがとうございます。



La Belle Vie Laboratory Inc.

ら・べるびい 予防医学研究所

株式会社ら・べるびい 予防医学研究所

〒103-0006

東京都中央区日本橋富沢町 8-4 イワサキ第一ビル

tel. 03-5614-2711 fax. 03-3668-5001